

Los iconos de modo son ejemplos de los que aparecen cuando el Inogen One® G5 está funcionando con una fuente de alimentación externa y la batería está cargándose. El símbolo de relámpago indica que una fuente de alimentación externa se encuentra conectada.

	La batería está completamente cargada y continúa cargándose según sea necesario para conservar su carga.
	La batería está cargándose, con un nivel de carga de entre el 60 % y el 70 %.
	La batería está cargándose, con un nivel de carga inferior al 10 %.
	El Inogen One® G5 está funcionando con una fuente de alimentación externa sin que haya batería.

Iconos de función

A continuación se muestran los iconos mostrados en la ventana de la pantalla.

	Se activó la alerta sonora de detección de la respiración.
	Se desactivó la alerta sonora de detección de la respiración. Esta situación es la predeterminada.
	Nivel de sonido 1
	Nivel de sonido 2
	Nivel de sonido 3
	Nivel de sonido 4

Iconos de la pantalla

Los iconos siguientes son ejemplos de los que aparecen cuando se activa/desactiva la función Bluetooth.

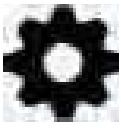
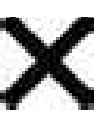
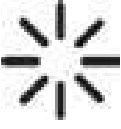
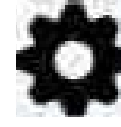
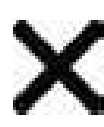
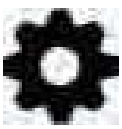
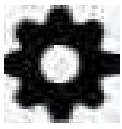
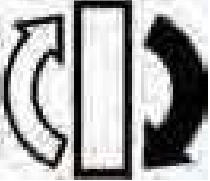
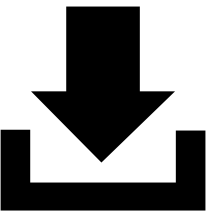
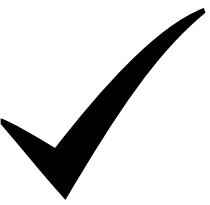
	Bluetooth desactivado.
	Bluetooth activado.
	Sincronización con la aplicación Inogen Connect.
	Concentrador no sincronizado desde el dispositivo móvil.

PARA MAS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTÁCTENOS EN OXIMEDICAL COLOMBIA SAS:

BOGOTÁ: (031) 390 56 20 • CALI: (032) 485 06 08
• MEDELLÍN: (034) 607 12 62 • PEREIRA: (036) 340 04 07 • IBAGUÉ: (038) 277 12 82
• PASTO: (032) 738 23 83 Ext: 7 • MIAMI: +1 305 4598648
CEL.:  +57 315 783 7832
CUSTOMER SERVICE LINE: TOLL FREE # 1-800-591-3409
email: oxigenopoc@gmail.com - www.oxigenopoc.com

Iconos de información

Los siguientes iconos exhibidos no se acompañan de señales sonoras ni de cambios visibles en las luces indicadoras.

Descripción	Iconos de la pantalla	Situación/acción/explicación
Configurando X Espere	  	Se muestra durante el calentamiento. "X" representa el nivel de flujo seleccionado (por ejemplo, nivel 2).
Configurando X Horas:Minutos de batería	  HH:MM	Pantalla preestablecida para el funcionamiento con la energía de la batería. "X" representa el nivel de flujo seleccionado (por ejemplo, nivel 2). "HH:MM" representa el tiempo aproximado restante de la carga de la batería (por ejemplo, 1:45).
Configurando X Batería cargando XX %	  	Pantalla preestablecida para el funcionamiento con una fuente de alimentación externa y la batería cargándose. "xx %" representa el porcentaje de carga de la batería (por ejemplo, 86 %).
Configuración X xx % de batería	  	Pantalla preestablecida cuando la batería no está cargándose o cuando no está disponible el tiempo restante de la misma.
Batería cargando XX %	 	Se muestra cuando el concentrador está conectado y utilizándose para cargar una batería (no para la producción de oxígeno). Es normal ver una lectura de batería plenamente cargada de entre el 95 % y el 100 % cuando se desconecta el suministro externo de energía. Esta particularidad optimiza al máximo la vida útil de la batería.
Reajuste de los tamices		Aparece cuando se necesita la columna de mantenimiento y una vez que se han instalado las columnas de repuesto.
Reajuste de los tamices exitoso		Aparece cuando las columnas se han reajustado correctamente.
Transferencia del registro de datos en curso O Actualización de SW en curso (aplicación únicamente)		Este icono aparece durante todas las transferencias de los registros de datos y actualizaciones de software iniciados a través de la aplicación Inogen Connect.
Transferencia de registro de datos exitosa (aplicación únicamente)		Este icono aparece luego de que las transferencias de los registros se han realizado correctamente a través de la aplicación Inogen Connect.

PARA MAS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTÁCTENOS EN OXIMEDICAL COLOMBIA SAS:

BOGOTÁ: (031) 390 56 20 • CALI: (032) 485 06 08
• MEDELLÍN: (034) 607 12 62 • PEREIRA: (036) 340 04 07 • IBAGUÉ: (038) 277 12 82
• PASTO: (032) 738 23 83 Ext: 7 • MIAMI: +1 305 4598648
CEL.:  +57 315 783 7832
CUSTOMER SERVICE LINE: TOLL FREE # 1-800-591-3409
email: oxigenopoc@gmail.com - www.oxigenopoc.com

Iconos de notificación

El Inogen One® G5 controla diversos parámetros durante la operación y utiliza un sistema de alertas inteligente para indicar un mal funcionamiento del concentrador. Se emplean algoritmos matemáticos y retardos de tiempo para reducir la probabilidad de falsas alertas y a la vez seguir asegurando la notificación adecuada de un estado de alerta.

Si se detectan múltiples estados de alerta, se mostrará la de máxima prioridad.

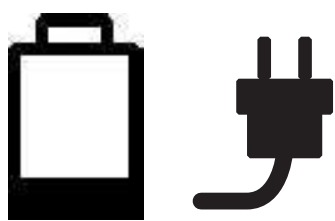
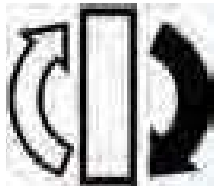
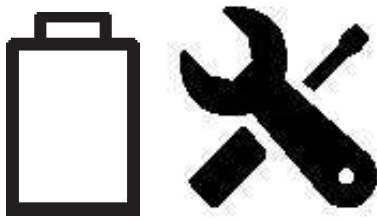
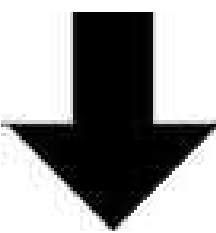
Tenga en cuenta que la falta de respuesta a causa de un estado de alerta en el caso de las alertas de prioridad baja, media y alta podría dar lugar solo a molestias o lesiones menores reversibles que se desarrollan dentro del tiempo necesario para usar una fuente alternativa de oxígeno.

Los siguientes íconos de notificación se emiten con un pitido único y breve.

Descripción	Iconos de la pantalla	Situación/acción/explicación
Espere Apagando		Se presionó el botón de encendido/apagado durante dos segundos. El concentrador está apagando el sistema.
Horas:Minutos Versión de software: Número de serie	HH:MM Vx.x:SN	Se presionó el botón de alerta sonora durante cinco segundos.

Alertas de baja prioridad

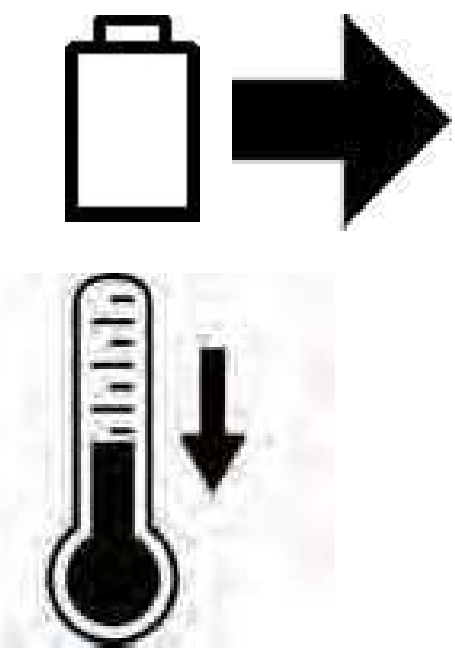
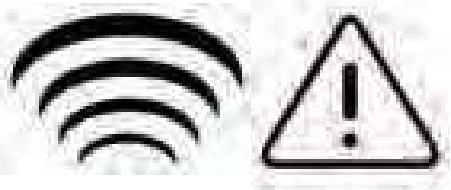
Las siguientes alertas de baja prioridad están acompañadas por **dos pitidos** y una **luz amarilla fija**.

Descripción	Iconos de la pantalla	Situación/acción/explicación
Batería baja Conecte enchufe		El nivel de carga de la batería es bajo, con menos de 10 minutos restantes. Conecte una fuente de alimentación externa o desconecte e inserte una batería completamente cargada.
Cambie las columnas		Es necesario efectuar un mantenimiento de las columnas en un plazo de 30 días. Comuníquese con el proveedor de su equipo para acordar cómo realizar el mantenimiento.
Error de batería		Se produjo un error en la batería. Verifique la conexión de la batería y asegúrese de que esté colocada correctamente y asegurada al concentrador. Si el error ocurre nuevamente con la misma batería, deje de usarla y cámbiela por una nueva o retírela y utilice el concentrador con la fuente de alimentación externa.
Oxígeno bajo	O2 	El concentrador está produciendo oxígeno a un nivel ligeramente bajo (<82 %) durante un período de 10 minutos. Si la condición persiste, comuníquese con el proveedor del equipo.

PARA MAS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTÁCTENOS EN OXIMEDICAL COLOMBIA SAS:

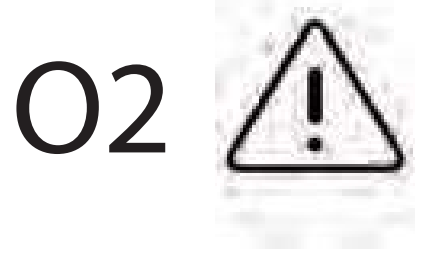
BOGOTÁ: (031) 390 56 20 • CALI: (032) 485 06 08
• MEDELLÍN: (034) 607 12 62 • PEREIRA: (036) 340 04 07 • IBAGUÉ: (038) 277 12 82
• PASTO: (032) 738 23 83 Ext: 7 • MIAMI: +1 305 4598648
CEL.:  +57 315 783 7832
CUSTOMER SERVICE LINE: TOLL FREE # 1-800-591-3409
email: oxigenopoc@gmail.com - www.oxigenopoc.com

Alertas de prioridad baja (continuación)

Descripción	Iconos de la pantalla	Situación/acción/explicación
Retire la batería para que se enfríe		La batería excedió su temperatura de carga y se interrumpió la carga. La batería no se cargará mientras persista esta alerta, pero comenzará a cargarse cuando su temperatura retorne a los límites normales de funcionamiento. Si desea que la batería se cargue antes, sáquela del concentrador y déjela enfriar en un espacio abierto entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Luego, vuelva a insertar la batería en el Inogen One® G5. Si el problema persiste, comuníquese con el proveedor del equipo.
Revise la unidad pronto		El concentrador necesita servicio de mantenimiento lo antes posible. El concentrador está funcionando según la especificación y puede continuar en uso. Comuníquese con el proveedor de su equipo para acordar cómo realizar el mantenimiento.
Falla del sensor		Falló el sensor de oxígeno del concentrador. Usted puede seguir utilizando el concentrador. Si la situación persiste, comuníquese con el proveedor del equipo.

Alertas de prioridad intermedia

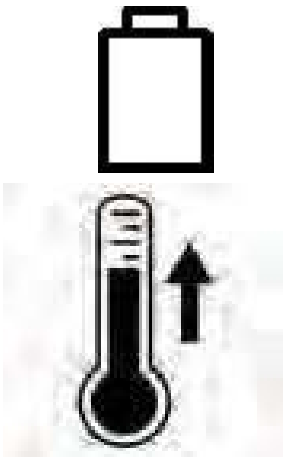
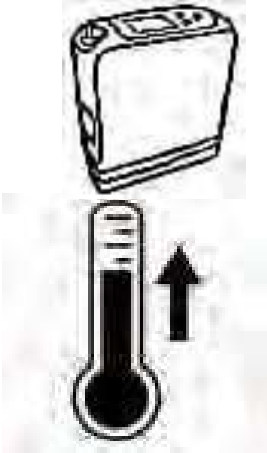
Las siguientes alertas de prioridad intermedia están acompañadas por **tres pitidos**, que se repiten cada 25 segundos, y una **luz amarilla intermitente**.

Descripción	Iconos de la pantalla	Situación/acción/explicación
No capta aliento Revise cánula		El concentrador no ha detectado la respiración durante 60 segundos. Compruebe que la cánula esté conectada al concentrador y que la tenga colocada correctamente en la nariz, así como que los tubos no estén retorcidos.
Error en la administración de oxígeno		La concentración de producción de oxígeno ha sido inferior al 50 % durante 10 minutos. Si la condición persiste, utilice una fuente alterna de oxígeno y comuníquese con el proveedor de su equipo para disponer el servicio de mantenimiento.
Error en el suministro de oxígeno		Se ha reconocido una respiración, pero no se ha detectado un suministro adecuado de oxígeno.

PARA MAS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTÁCTENOS EN OXIMEDICAL COLOMBIA SAS:

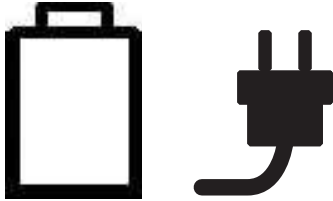
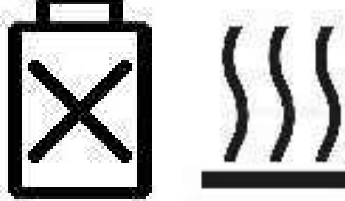
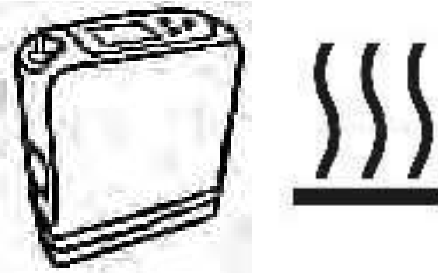
BOGOTÁ: (031) 390 56 20 • CALI: (032) 485 06 08
• MEDELLÍN: (034) 607 12 62 • PEREIRA: (036) 340 04 07 • IBAGUÉ: (038) 277 12 82
• PASTO: (032) 738 23 83 Ext: 7 • MIAMI: +1 305 4598648
CEL.:  +57 315 783 7832
CUSTOMER SERVICE LINE: TOLL FREE # 1-800-591-3409
email: oxigenopoc@gmail.com - www.oxigenopoc.com

Alertas de prioridad intermedia (continuación)

Descripción	Iconos de la pantalla	Situación/acción/explicación
Batería CALIENTE Advertencia		La batería excedió el límite de temperatura mientras el concentrador la estaba utilizando como suministro eléctrico. Si es posible, ubique el concentrador en un lugar más fresco o ponga a funcionar la unidad con una fuente de alimentación externa y saque la batería. Si la condición persiste, comuníquese con el proveedor del equipo.
Sistema caliente Advertencia		El concentrador excedió el límite de temperatura. Si es posible, coloque el concentrador en un lugar más fresco. Confirme que se pueda acceder sin dificultad a las rejillas de entrada y salida de aire y que los filtros de partículas estén limpios. Si la condición persiste, comuníquese con el proveedor del equipo.

Alertas de prioridad elevada

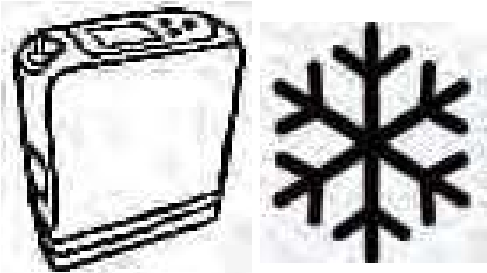
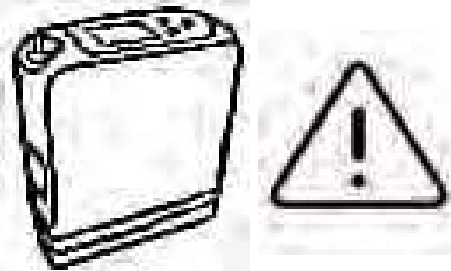
Las siguientes alertas de prioridad elevada están acompañadas por **cinco pitidos**, repetidos cada 10 segundos, y una **luz amarilla intermitente**.

Descripción	Iconos de la pantalla	Situación/acción/explicación
Batería descargada Conecte la clavija		El suministro eléctrico de la batería del concentrador es insuficiente para producir oxígeno. Conecte una fuente de alimentación externa o cambie la batería; en caso necesario reinicie la unidad presionando el botón de encendido/apagado.
Batería CALIENTE		La batería excedió el límite de temperatura mientras el concentrador la estaba utilizando como suministro eléctrico. El concentrador dejó de producir oxígeno. Si es posible, coloque el concentrador en un lugar más fresco; luego, apague el dispositivo y enciéndalo de nuevo. Confirme que se pueda acceder sin dificultad a las rejillas de entrada y salida de aire y que los filtros de partículas estén limpios. Si la situación persiste, utilice una fuente alternativa de oxígeno y comuníquese con el proveedor del equipo.
Sistema CALIENTE		La temperatura del concentrador es demasiado elevada y la producción de oxígeno está cesando. Confirme que se pueda acceder sin dificultad a las rejillas de entrada y salida de aire y que los filtros de partículas estén limpios. Si la situación persiste, utilice una fuente alternativa de oxígeno y comuníquese con el proveedor del equipo.

PARA MAS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTÁCTENOS EN OXIMEDICAL COLOMBIA SAS:

BOGOTÁ: (031) 390 56 20 • CALI: (032) 485 06 08
• MEDELLÍN: (034) 607 12 62 • PEREIRA: (036) 340 04 07 • IBAGUÉ: (038) 277 12 82
• PASTO: (032) 738 23 83 Ext: 7 • MIAMI: +1 305 4598648
CEL.:  +57 315 783 7832
CUSTOMER SERVICE LINE: TOLL FREE # 1-800-591-3409
email: oxigenopoc@gmail.com - www.oxigenopoc.com

Alertas de prioridad elevada (continuación)

Descripción	Iconos de la pantalla	Situación/acción/explicación
Sistema FRÍO		Esto puede ocurrir por guardar el concentrador en un ambiente frío (temperatura inferior a 0 °C [32 °F]). Colóquelo en un lugar más cálido para permitir que la unidad se caliente antes de ponerla en marcha. Si la situación persiste, utilice una fuente alternativa de oxígeno y comuníquese con el proveedor del equipo.
Error de sistema		El concentrador ha dejado de producir oxígeno y está apagándose. Usted deberá hacer lo siguiente: 1. Utilizar una fuente alternativa de oxígeno. 2. Comuníquese con el proveedor del equipo.

6. Solución de problemas técnicos

Problema	Causa posible	Solución recomendada
Cualquier problema acompañado por información en la pantalla del concentrador, luces indicadoras y/o señales sonoras.	Consulte el Capítulo 5.	Consulte el Capítulo 5.
El concentrador no enciende al presionar el botón de encendido/apagado.	No hay batería o esta se encuentra descargada.	Utilice una fuente de alimentación externa o sustituya la batería por una completamente cargada.
	La fuente de alimentación de corriente alterna no está bien conectada.	Compruebe la conexión a la alimentación eléctrica y verifique que la luz verde haya quedado fija.
	El cable de corriente continua no está bien conectado.	Inspeccione la conexión del cable de corriente continua en el concentrador y en el suministro eléctrico de corriente continua del encendedor de cigarrillos u otro auxiliar.
	Funcionamiento inadecuado.	Comuníquese con el proveedor del equipo.
No hay producción de oxígeno.	El concentrador no está encendido.	Cuando quiera poner el concentrador en marcha, presione el botón de encendido/apagado.
	La cánula no está debidamente conectada o está retorcida u obstruida.	Revise la cánula y su conexión con la boquilla del concentrador.

PARA MAS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTÁCTENOS EN OXIMEDICAL COLOMBIA SAS:

BOGOTÁ: (031) 390 56 20 • CALI: (032) 485 06 08
• MEDELLÍN: (034) 607 12 62 • PEREIRA: (036) 340 04 07 • IBAGUÉ: (038) 277 12 82
• PASTO: (032) 738 23 83 Ext: 7 • MIAMI: +1 305 4598648
CEL.:  +57 315 783 7832
CUSTOMER SERVICE LINE: TOLL FREE # 1-800-591-3409
email: oxigenopoc@gmail.com - www.oxigenopoc.com