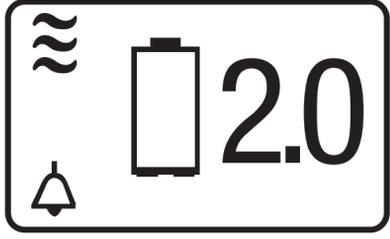


## Símbolos de la pantalla e indicadores de alarma

Indicadores visuales y auditivos	Descripción	Qué hacer
 <p>3 pitidos cortos + 1 pitido largo</p>	<p><b>Alarma de falta de respiración</b></p> <p>Esta alarma se produce cuando no se detecta una respiración durante un periodo de 2 minutos o más. Puede silenciarse pulsando el símbolo de alarma. Esta alarma se silencia tan pronto como se detecta una respiración. Si no se detecta ninguna respiración después de aproximadamente 30 minutos, el dispositivo se apaga para conservar energía. (Esta alarma está inactiva durante diez minutos después de la puesta en marcha).</p>	<p>Compruebe la conexión de la cánula al dispositivo. Asegúrese de que la cánula nasal esté adecuadamente colocada sobre su rostro y de estar respirando a través de la nariz. Asegúrese de que el tubo de la cánula no esté retorcido ni obstruido.</p>
 <p>3 pitidos largos + 1 pitido corto</p>	<p><b>Alarma de concentración de oxígeno baja</b></p> <p>Esta alarma se produce cuando el dispositivo está administrando una concentración de oxígeno inferior a la especificada. Esta alarma puede silenciarse pulsando el símbolo de alarma.</p>	<p>Cambie a otra fuente de oxígeno y póngase en contacto con su proveedor del equipo.</p>
 <p>1 pitido largo después de 2 minutos</p>	<p><b>Alarma de frecuencia respiratoria alta</b></p> <p>Esta alarma indica que la frecuencia respiratoria del usuario supera la capacidad del dispositivo. El dispositivo sigue funcionando adecuadamente y todavía suministra oxígeno a la tasa especificada para la configuración. Los pitidos pueden silenciarse pulsando el símbolo de alarma.</p>	<p>La alarma se restablece cuando la frecuencia respiratoria se reduce. Si esta alarma se produce regularmente, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.</p>

Indicadores visuales y auditivos	Descripción	Qué hacer
 <p>3 pitidos cortos + 3 pitidos largos</p>	<p><b>Alarma de fallo técnico</b></p> <p>Esta alarma se produce cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la batería se agota o</li> <li>b) el dispositivo sufre un funcionamiento defectuoso general y ya no puede funcionar adecuadamente.</li> </ul> <p>El dispositivo puede apagarse o no dependiendo de la gravedad de la alarma.</p> <p>Esta alarma puede silenciarse si el símbolo  aparece en pantalla.</p>	<p>Recargue la batería e intente reiniciar el dispositivo.</p> <p>Si se vuelve a producir esta alarma, cambie a otra fuente de oxígeno y póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.</p>
 <p>1 pitido corto</p>	<p><b>Alarma de batería baja</b></p> <p>Esta alarma se produce cuando quedan aproximadamente 17 minutos de carga de batería. La carga de la batería restante depende de la configuración de su dispositivo y de su nivel de actividad. El símbolo de batería vacía parpadea en pantalla.</p>	<p>Cambie la batería o conecte una fuente de alimentación.</p> <p>(Pulse el símbolo de alarma para silenciar la alarma).</p>
 <p>3 pitidos largos + 1 pitido corto</p>	<p><b>Alarma de ausencia de flujo</b></p> <p>Esta alarma se produce cuando el dispositivo detecta que no hay flujo de oxígeno en la cánula del paciente.</p>	<p>Compruebe si la cánula presenta retorcimientos u otras obstrucciones que detengan el flujo de oxígeno.</p>

Indicadores visuales y auditivos	Descripción	Qué hacer
 <p>Pitidos cortos y largos alternos</p>	<p><b>Alarma de batería agotada</b></p> <p>Esta alarma se produce cuando quedan aproximadamente dos minutos de carga de batería. El símbolo de batería parpadea en pantalla.</p>	<p>Cambie o recargue la batería.</p> <p>(Pulse el símbolo de alarma para silenciar la alarma).</p>
	<p><b>Símbolo de silenciar alarma</b></p> <p>Este símbolo aparece cuando pulsa el botón Silenciar alarma para silenciar la alarma audible (pitidos).</p>	<p>No hay que realizar ninguna otra acción.</p>
	<p><b>Atención</b></p> <p>Este símbolo aparece cuando es necesaria una medida correctiva.</p>	<p>Deje que se caliente el dispositivo. Si la alarma continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.</p>
	<p><b>Símbolo de batería cargando mientras está casi vacía</b></p> <p>Este símbolo de batería aparece (con las barras de carga desplazándose en el lado izquierdo) cuando la batería está casi agotada y recargándose.</p>	<p>No es necesario hacer nada.</p>

Indicadores visuales y auditivos	Descripción	Qué hacer
	<p><b>Símbolo de batería cargando mientras está parcialmente llena</b></p> <p>Cuando aparece un símbolo de batería similar a este (con las barras de carga desplazándose a la izquierda y a media altura a la derecha), la batería está parcialmente llena y recargándose. El lado izquierdo del símbolo indica el proceso de carga y el lado derecho indica el nivel de batería.</p>	<p>No es necesario hacer nada.</p>
 <p>1 pitido largo</p>	<p><b>Símbolo de carga de batería completa</b></p> <p>Este símbolo de batería aparece cuando la batería está totalmente cargada.</p>	<p>No es necesario hacer nada.</p>
	<p><b>Símbolo de conexión de alimentación</b></p> <p>Este símbolo aparece cuando el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación de CA, CC o aerolínea.</p>	<p>No es necesario hacer nada.</p>
<p>(Desaparece el símbolo de conexión de alimentación)</p> <p>1 pitido corto</p>	<p>El símbolo de conexión de alimentación desaparece cuando el dispositivo está desconectado de la fuente de alimentación.</p>	<p>No es necesario hacer nada.</p>

Indicadores visuales y auditivos	Descripción	Qué hacer
 <p>1º pulsación del botón de encendido/apagado = 1 pitido largo</p> <p>2º pulsación del botón de encendido/apagado para apagar el dispositivo = 3 pitidos largos</p>	<p><b>Símbolo de encendido/apagado</b></p> <p>Este símbolo aparece cuando el dispositivo está encendido, o está listo para ser encendido o apagado.</p>	<p>Pulse el botón de encendido/apagado para encender y apagar el dispositivo.</p> <p><b>Nota:</b> Para impedir que se produzcan arranques o interrupciones accidentales, el dispositivo requiere que se pulse dos veces el botón de encendido/apagado para encenderlo y apagarlo.</p>
	<p><b>Símbolo de pulso</b></p> <p>El cuadradito aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla cuando el dispositivo administra un pulso, siempre que inspira.</p>	<p>No es necesario hacer nada.</p>
	<p><b>Indicador de modo Pulso</b></p> <p>Este símbolo aparece cuando el dispositivo está funcionando en modo Pulso.</p>	<p><b>Si este es su ajuste del modo,</b> no tiene que realizar ninguna acción.</p> <p><b>Si este no es su ajuste del modo,</b> pulse el botón de modo hasta que aparezca el ajuste de modo adecuado.</p>
	<p><b>Indicador de modo Sueño</b></p> <p>Este símbolo aparece cuando el dispositivo está funcionando en modo Sueño.</p>	<p><b>Si este es su ajuste del modo,</b> no tiene que realizar ninguna acción.</p> <p><b>Si este no es su ajuste del modo,</b> pulse el botón de modo hasta que aparezca el ajuste de modo adecuado.</p>

Indicadores visuales y auditivos	Descripción	Qué hacer
	<p><b>Indicador de modo Flujo continuo</b></p> <p>Este símbolo aparece cuando el dispositivo está funcionando en modo Flujo continuo.</p>	<p><b>Si este es su ajuste del modo</b>, no tiene que realizar ninguna acción.</p> <p><b>Si este no es su ajuste del modo</b>, pulse el botón de modo hasta que aparezca el ajuste de modo adecuado.</p>
<p><b>2.0</b></p> <p>1 pitido corto</p>	<p><b>Configuración de control de flujo</b></p> <p>El número grande del lado derecho de la pantalla muestra la configuración de flujo de oxígeno. (En este ejemplo, es 2). Este número puede oscilar de 1 a 6 en incrementos de 0,5 para los modos Pulso y Sueño y de 0,5 a 2 para el modo Flujo continuo.</p>	<p><b>Si esta es su configuración de flujo</b>, no tiene que hacer nada.</p> <p><b>Si esta no es su configuración de flujo</b>, pulse el botón + para aumentar este número o pulse el botón – para reducirlo.</p>

## Solución de problemas

La siguiente tabla enumera los problemas comunes y las acciones que puede emprender. Si no puede resolver un problema, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.

Problema	Causa posible	Qué debe hacer
El dispositivo no enciende	La batería está agotada.	Utilice los cables de alimentación de CA o CC para hacer funcionar el dispositivo (con la batería insertada) y para recargar la batería. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.
	Batería no instalada correctamente.	Extraiga la batería y vuelva a instalarla correctamente.
	Botón de encendido/apagado no presionado dos veces.	Pulse el botón de encendido/apagado dos veces.
El dispositivo no activará un pulso de oxígeno	SimplyGo no está encendido.	Pulse el botón de encendido/apagado dos veces.
	El tubo de la cánula está retorcido o doblado.	Asegúrese de que el tubo esté conectado adecuadamente al orificio de salida de oxígeno y de que no sufra ninguna obstrucción.
	Funcionamiento defectuoso del dispositivo.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.
El oxígeno no se administra a la concentración completa	El dispositivo se está calentando.	Espere 10 minutos para que el dispositivo administre oxígeno a la concentración prescrita. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.
Se produce una alarma	El dispositivo necesita su atención.	Consulte el apartado Símbolos de la pantalla e indicadores de alarma para obtener información sobre las alarmas concretas y saber qué debe hacer.



**BOGOTÁ: (601) 390 56 20 • CALI: (602) 485 06 08**  
**• MEDELLÍN: (604) 607 12 62 • PEREIRA: (606) 340 04 07 • IBAGUÉ: (608) 277 12 82**  
**• PASTO: (602) 738 23 83 Ext: 7 • MIAMI: +1 305 4598648**

**CEL.:  +57 315 783 7832**

**CUSTOMER SERVICE LINE: TOLL FREE # 1-800-591-3409**

** [oxigenopoc@gmail.com](mailto:oxigenopoc@gmail.com)  [www.oxigenopoc.com](http://www.oxigenopoc.com)**

